



Medizinisches Hals-Rachen-Spray

Medizinprodukt

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zweckbestimmung:

Das Medizinische Hals-Rachen-Spray mit seinen befeuchtenden Eigenschaften unterstützt die Wiederherstellung einer physiologisch normalen und schützenden Funktion der Mund- und Rachenschleimhaut.

So trägt es auf natürliche Weise zur Regeneration bzw. Wiederherstellung einer physiologisch normalen und schützenden Mund- und Rachenschleimhaut bei.

Zusammensetzung:

Was ist in Medizinisches Hals-Rachen-Spray enthalten?

Gereinigtes Wasser, Isländisch Moos Spissum Extrakt (2,8 %), Dexpanthenol, Natursole Salzlösung (1,5 %), Polysorbat 80, Kamillenfluidextrakt, Zinksulfat Heptahydrat, Natriumbenzoat, Menthol, Eucalyptusöl, L-Histidin Hydrochlorid Monohydrat, Citronensäure, Acesulfam K, Kaliumsorbat, Sorbinsäure.

Darreichungsform und Inhalt:

Was ist Medizinisches Hals-Rachen-Spray und wofür wird es angewendet?

Dosierspray mit 30 ml Lösung zum Einsprühen in den Mund- und Rachenraum.

Anwendungsgebiet:

Wann wird Medizinisches Hals-Rachen-Spray angewendet?

Zur Unterstützung der natürlichen Befeuchtung der Mund- und Rachenschleimhaut bei:

- Halsschmerzen und Heiserkeit,
- trockenem Husten und belegter Stimme, die Folge von gereizter Mund- und Rachenschleimhaut sind.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Medizinisches Hals-Rachen-Spray nicht anwenden?

Medizinisches Hals-Rachen-Spray darf nicht angewendet werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der unter „Zusammensetzung“ genannten Bestandteile dieses Medizinproduktes sind.
- nach Operationen, bei Verletzungen oder starken Entzündungen im Hals- oder Rachenbereich.

Darf Medizinisches Hals-Rachen-Spray in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden?

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein, fragen Sie vor der Anwendung dieses Medizinproduktes Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Vorsichtsmaßnahmen und besondere Hinweise:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Drehen Sie den abklappbaren Schnabel an der Flasche zur Seite und drücken Sie den Pumpknopf herunter. Bitte beachten Sie, dass vor dem Erstgebrauch einige Pumpstöße benötigt werden.

Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, den Sprühaufsatz nach jeder Anwendung durch Abwischen mit einem sauberen Tuch zu reinigen. Jede Sprühflasche sollte zur Vermeidung von Infektionen nur von einer Person angewendet werden.

Nicht in die Augen sprühen.

Um eine einwandfreie Qualität des Produktes und die Funktion des Applikationssystems über die Anwendungsdauer zu gewährleisten, darf an der Sprayflasche keine Manipulation vorgenommen werden.

Eine eventuell verbleibende Restmenge ist technisch bedingt und in der Füllmenge berücksichtigt.



Wenn innerhalb von 4 - 7 Tagen keine Besserung der Beschwerden eintritt, sollte der Rat des Arztes in Anspruch genommen werden.

Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren sollte nur unter Aufsicht Erwachsener stattfinden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Medizinisches Hals-Rachen-Spray anwenden?

Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene:

Je nach Bedarf mehrmals täglich 1 - 2 Sprühstöße (0,14 ml je Sprühstoß) in den Mund- und Rachenraum sprühen.

Wie lange sollten Sie Medizinisches Hals-Rachen-Spray anwenden?

Bei Bedarf kann Medizinisches Hals-Rachen-Spray bis zum Abklingen der Beschwerden angewendet werden.

Wenn Sie eine größere Menge Medizinisches Hals-Rachen-Spray angewendet haben, als Sie sollten:

Vergiftungen und Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Leichtes Brennen im Mund- und Rachenraum kann nicht ausgeschlossen werden.

In einzelnen Fällen kann es zu einer Unverträglichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen von Medizinisches Hals-Rachen-Spray kommen.


Die Quantifizierung der Häufigkeit ist auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar.

Meldung von Nebenwirkungen/ Schwerwiegenden Vorkommnissen:

Wenn Sie Nebenwirkungen oder eine im Zusammenhang mit dem Medizinprodukt stehende Verschlechterung des Gesundheitszustands bemerken, wenden Sie sich an die unter „Hersteller“ angegebene Adresse. Dies gilt auch für Nebenwirkungen/ Schwerwiegende Vorkommnisse, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Medizinproduktes zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes:

Medizinisches Hals-Rachen-Spray darf nur bis zu dem auf dem Etikett und der Faltschachtel mit  „Verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden.

Nach Anbruch nicht länger als 6 Wochen verwenden.

Aufbewahrungshinweise:

Nicht über 25 °C und nicht unter 5 °C aufbewahren.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information: September 2019

Art.-Nr.: 248

PB0320

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie bitte die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.